




- Préparer les lames d'étalement en les nettoyant à l'alcool.  
Ecrire au crayon le nom du patient sur la partie dépolie.
- Frotter fortement (jusqu'à saignotement) avec un abaisse-langue la face interne de la joue (pour recueillir les cellules des couches les plus basales de l'épithélium).
- Frotter 1 ou 2 écouvillons (privilégier les écouvillons « avec » gel), identifiés au nom du patient, à nouveau au niveau de la face interne de la joue
- Etaler les cellules au centre de la lame (veiller à bien étaler sur la même face que le nom).  
Il faut minimum 2 lames par patient.

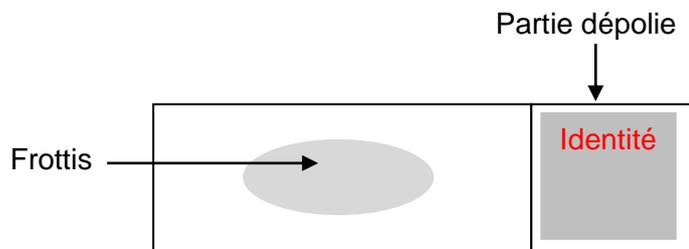

- Laisser sécher à l'air.
- Mettre les lames sèches réalisées dans une boîte, joindre le(s) écouvillon(s) et envoyer le tout en URGENCE au service de cytogénétique médicale (ascenseur B, 2<sup>ème</sup> étage)
- JOINDRE IMPERATIVEMENT les 2 documents associés à cet examen dûment complétés et signés :
  - Feuille de prescription d'examen en cytogénétique constitutionnelle pré et post natale
  - Consentement pour examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales et/ou conservation en post natal
- Les résultats seront transmis au médecin prescripteur dans les 24h ouvrables après réception du prélèvement.